

# Welkom bij de Gezond & Zeker Innovatiedag 2018



**Gezond  
& zeker**

In actie voor veilig, energiek en gezond werken

# Goed aanbrengen en weghalen van de tilband in zit en in lig

Esther van der Heijden & Colin den Boer, Arjo

# Wat gaan we doen vandaag?



Aanbrengen van  
tilband in zit  
(eventueel met  
glijrol)





Verwijderen  
tilband in zit  
(eventueel met  
glijrol)



Aanbrengen  
tilband in lig met  
glijrol of dubbele  
glijlakens

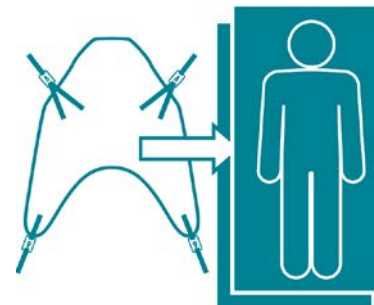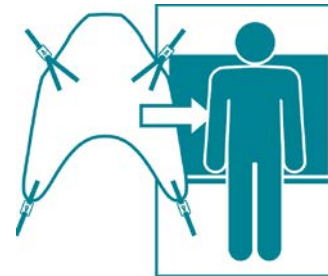

Verwijderen tilband  
in lig met glijrol of  
dubbele glijlakens

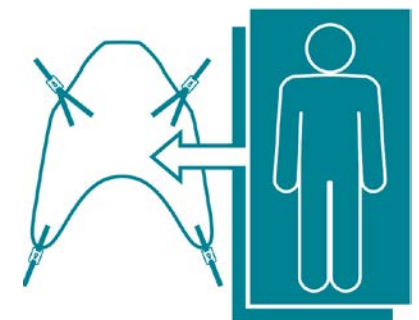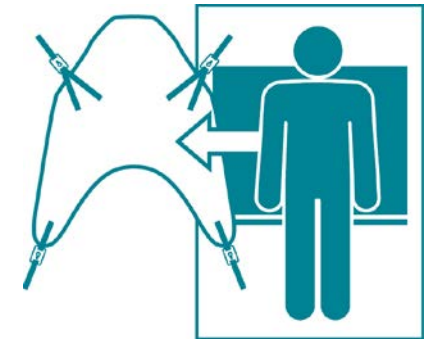

# Meer informatie?



[www.goedgebruik.nl](http://www.goedgebruik.nl)



## Handboek Transfers

### ALGEMEEN

Het aanbrengen van een tilband voor passief tillen bij een cliënt in zit, kan belastend zijn voor de zorgverlener. De voorkeur gaat er dan ook naar uit om bij cliënten die gedurende de dag alleen met een passieve tillift verplaatst worden, een verlijfsband te gebruiken, die zonder risico op druk of knellen, achter de cliënt aanwezig kan blijven. Soms komt het toch voor dat je een tilband bij een cliënt in zit moet aanbrengen of opnieuw goed moet plaatsen.

Voor een juist gebruik van de tilband en het bepalen van de juiste maatvoering is het noodzakelijk goed de gebruiksaanwijzing van de leverancier door te nemen en de aanwijzingen op te volgen.

### VOORBEREIDING

- Zorg dat je de (rol)stoel van alle kanten goed kan benaderen.
- Zet de rolstoel op de rem.
- Breng een kantelrolstoel in zitpositie.
- Verwijder eventueel de hoofdondersteuning van de rolstoel.
- Zorg voor een juiste maat tilband.
- Zorg dat je eventueel een (kleine) glijrol beschikbaar hebt.

